


# Withings

Smart Body Analyzer  
WS-50

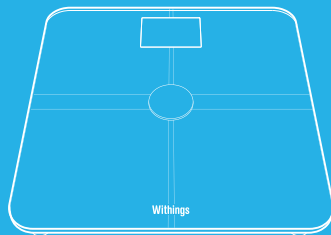

**Краткое руководство пользователя**

---




**НУЖНА ПОМОЩЬ**


→ <http://support.withings.com/ws50>

**Спасибо Вам за использование Smart Body Analyzer**


## СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

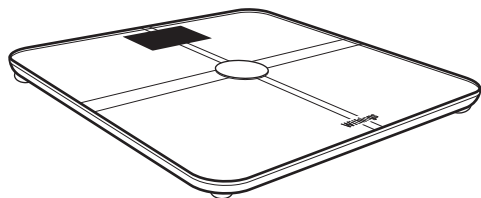

Smart Body Analyzer  
WS-50

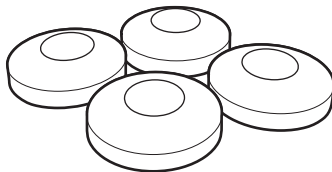

Напольные ножки

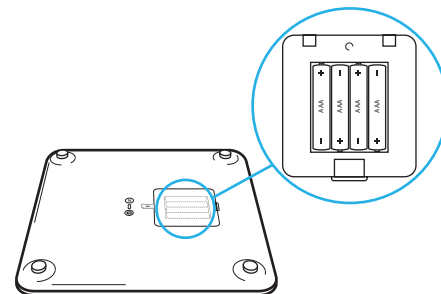


Щелочные батарейки  
предустановлены




## УСТАНОВКА НАПОЛЬНЫХ НОЖЕК

1

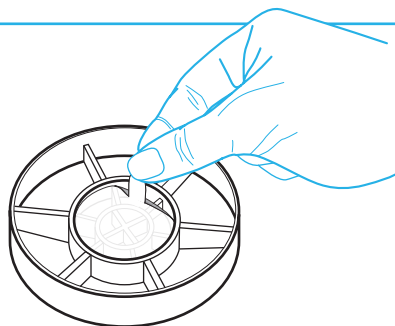


2

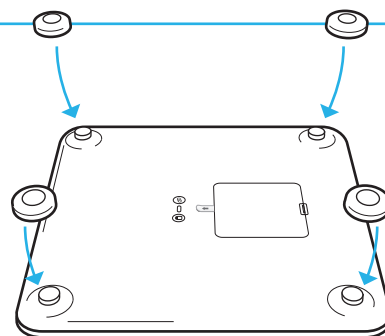


# УСТАНОВКА

Перед началом Вам необходимо:


---

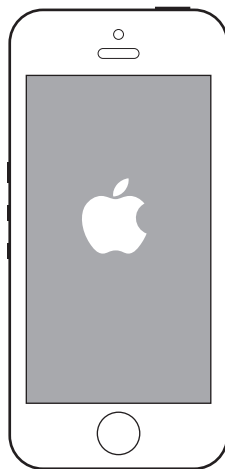

iPhone,  
iPad & iPod touch

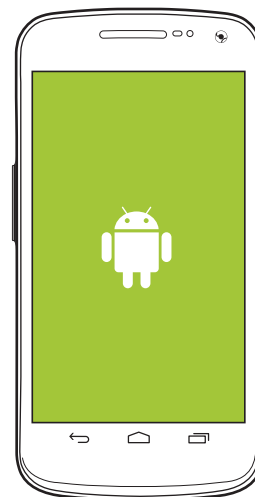

Android

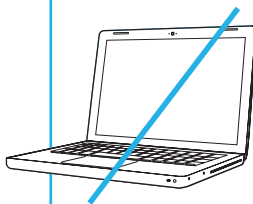


**Установка производится только с помощью смартфона.  
Персональный компьютер не нужен.**

# ВЕСЫ


## 1

Потяните за язычок в нижней части весов

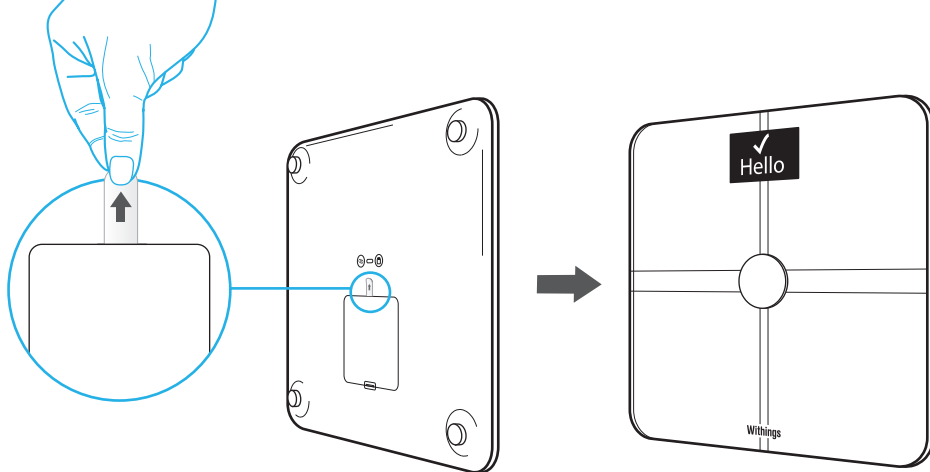

## 2


Нажмите кнопку "pairing" на 2 секунды

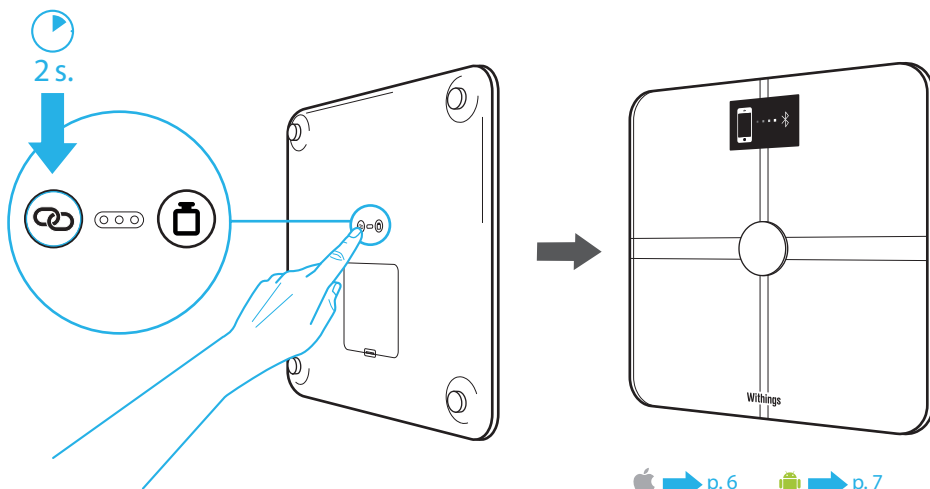

# IPHONE IPAD, IPOD TOUCH

## 3

Settings / Bluetooth / ON  
→ "Withings WS50"

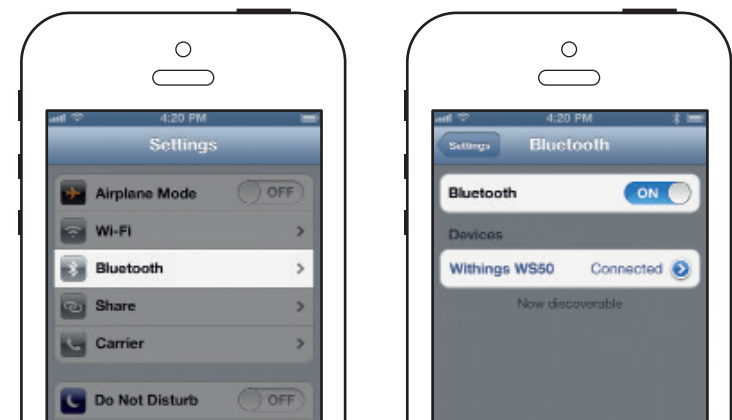

## 4

Установите и запустите приложение Withings с App Store, затем следуйте инструкциям




## 3

Settings / Bluetooth / ON  
→ "Withings WS50"





Settings

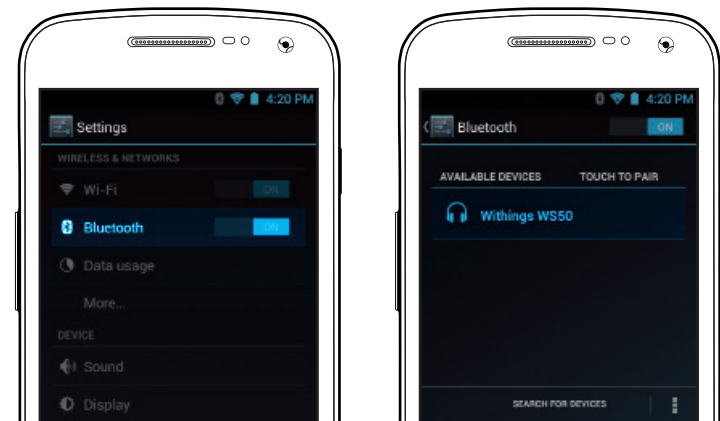


## 4

Установите и запустите приложение Withings с Google Play Store, затем следуйте инструкциям

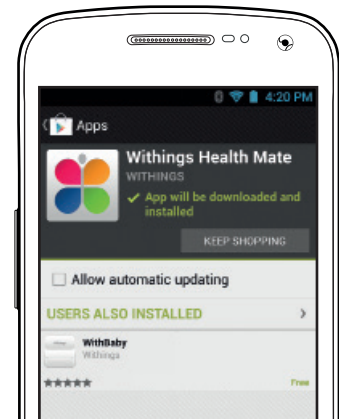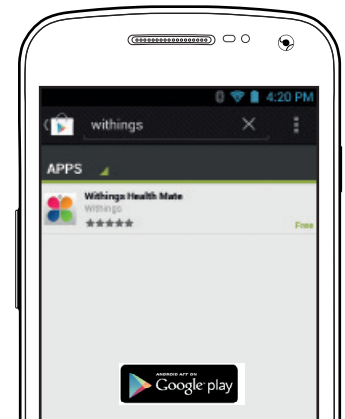

Withings

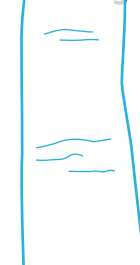


## ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ



- Данный продукт не подходит для людей, которые носят кардиостимулятор или другие внутренние медицинские устройства.
- Результаты измерения должны рассматриваться исключительно как справочная информация, а не как медицинское заключение.




## УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

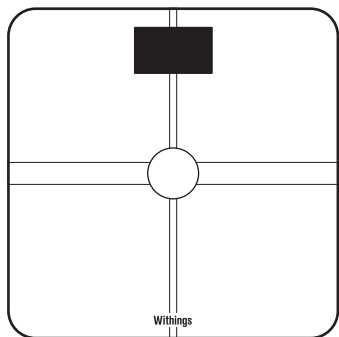

Протирать влажной тканью

- Используйте только ткань смоченную в воде для очистки весов. Использование любых моющих средств или очистителей может привести к необратимым повреждение покрытия, которое защищает электроды, используемые для измерения жира в организме и частоту сердечных сокращений.

## ОПИСАНИЕ

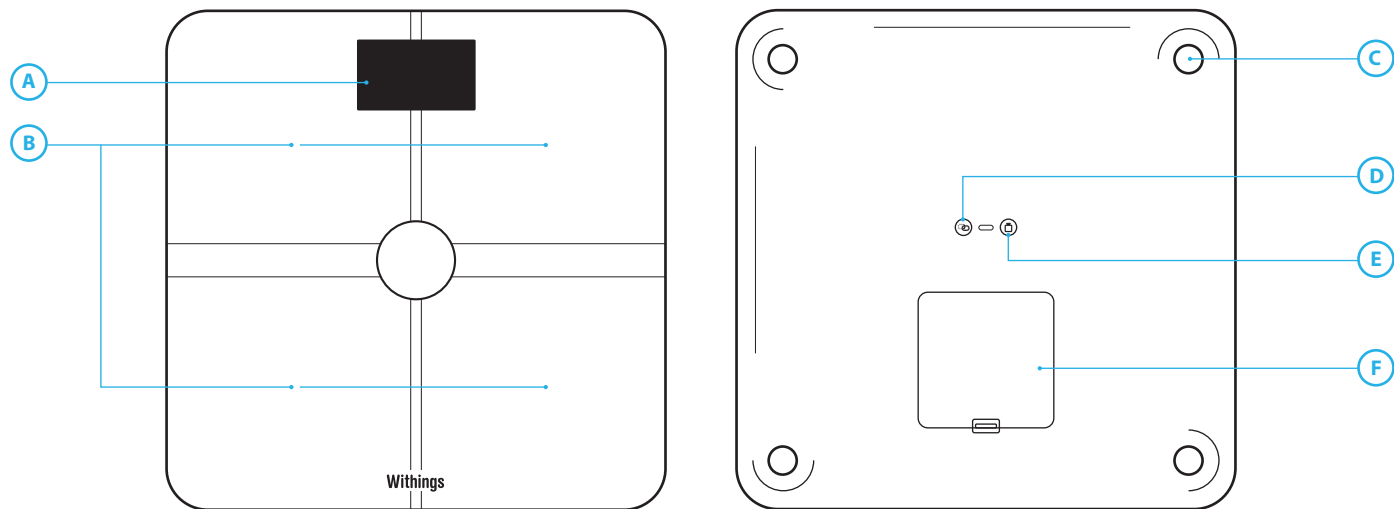

- Ⓐ Экран    Ⓑ Электроды    Ⓒ Ножки    Ⓓ Кнопка “pairing”    Ⓔ kg, st, lb    Ⓕ Крышка батарейного отсека



FCC ID: XNA-WS-50

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА:

Мастер-дистрибьютор Withings в России и странах СНГ - группа компаний FACTOR GROUP.

По всем вопросам оптового приобретения и установления партнерских отношений Вы можете:

Написать нам - [withings@fgmed.ru](mailto:withings@fgmed.ru)

Позвонить по телефону +7 (495) 780 - 76- 70

## Withings

WS-50 QIG | v 1.1 | March 19th, 2013

©2013 Withings. All right reserved.

iPad, iPhone and iPod touch are trademarks of Apple inc.

Android is a trademark of Google Inc.